

# Opti AIV-qPCR Kit

## (Cat. No. AVVS-001)



### 01 제품 개요

Opti AIV-qPCR은 조류 인플루엔자 바이러스(Avian influenza virus;AIV)의 감염이 의심되는 시료에서 특이 유전자를 사용하여 실시간 중합효소연쇄반응법(Real-time PCR)으로 증폭하여 바이러스의 존재여부를 감별하는 체외진단시약입니다.

#### 4.1 검체 준비 및 저장방법

- (1) 조류에서 유래된 혈액, 혈청, 조직 유제액 등을 무균용기에 넣어 밀봉된 상태로 채취한 후, 즉시 RNA를 추출하도록 합니다.

! 검체 채취 후 4°C를 유지하며 24시간 이내에 검사소로 송부하여, 바로 RNA를 추출해야 합니다. 검체를 오랜 기간 보관하거나 냉동과 해동을 반복하면 검사 민감도가 떨어질 수 있습니다.

### 02 제품 특성

- (1) Opti AIV-qPCR Kit는 유전자증폭(PCR)에 필요한 Primer, 형광 Probe, RT mix, Taq Polymerase 등 RNA로부터 유전자를 증폭하기 위한 필수 구성 요소가 들어있습니다.
- (2) 검체 내에 존재하는 PCR 저해제의 확인이 가능하도록 PCR Internal control primer와 형광 Probe가 포함되어 있습니다.

#### 4.2 검체 전처리 및 핵산 추출 등

- (1) 100~200 $\mu$ l 혈액, 혈청 및 조직 등에서 RNA를 추출하며, RNA 추출 방법은 각 제조사의 설명서를 참고하십시오.
- (2) 추출한 RNA는 PCR을 수행할 때까지 -20°C에 보관하며, 냉동 보관된 모든 검사 시약은 실험 전에 아이스에서 녹입니다.

! 본 제품은 RNA를 추출하는 별도의 시약을 제공하지 않으며, 사용하는 RNA 추출 Kit의 해당 사용 설명서에 따라 진행하시길 바랍니다.

### 03 제품 구성

| NO. | REAGENTS              | 96T                  |
|-----|-----------------------|----------------------|
| 1   | 8-strip               | 8*12 strip           |
| 2   | Positive control (PC) | 100 $\mu$ l/vial, 1개 |

### 04 검사 준비

### 05 PCR 검사

#### 05.1 PCR Master mixture 조성

- (1) 검사하려고 하는 시료의 수, 양성대조군, 음성대조군에 여분을 고려하여 8-strip을 준비하도록 합니다.
- (2) 8-strip에 template 및 양성 대조액을 5 $\mu$ l를 각각 분주합니다.

Opti SLBB Multi-qPCR Kit  
User Manual

# Opti AIV-qPCR Kit

## (Cat. No. AVVS-001)

(3) 뚜껑을 닫고 살짝 tapping하여 섞어준 후 원심분리 (spin-down)를 합니다

위 내에서의 결과를 양성으로 판독합니다.

### 05.2 PCR 증폭 진행

(1) 샘플을 Real-time PCR 기기에 넣어 다음 표의 조건으로 반응을 진행합니다.

| NO. | 온도 및 시간                                | Cycle                    |
|-----|--|--------------------------|
| 1   | 50°C, 10min<br>(Reverse transcription) | 1 cycle                  |
| 2   | 95°C, 3min<br>(Pre-denaturation)       | 1 cycle                  |
| 3   | 95°C, 3sec<br>(Denaturation)           | 10 cycle                 |
| 4   | 60°C, 30sec<br>(Annealing)             |                          |
| 5   | 95°C, 3sec<br>(Denaturation)           | 40 cycle<br>(plate read) |
| 6   | 55°C, 30sec<br>(Annealing)             |                          |

PCR 기계에서 dye 설정 시에는, FAM/HEX 한 well에서 설정될 수 있도록 지정합니다.

(3) 결과 분석은 다음 표와 같습니다.

| Amplification Signal | 결과 분석   |
|----------------------|---|
| FAM 양성,<br>HEX 양성    | 양성  |
| FAM 양성,<br>HEX 음성    | 양성,<br>검체 RNA의 농도가 높은 경우 IC가<br>검출되지 않을 수도 있음             |
| FAM 음성,<br>HEX 양성    | 음성  |
| FAM 음성,<br>HEX 음성    | 음성,<br>IC에서 음성이 나온 경우, 검체의 양이 너무 많거나<br>적은 경우이므로 재검사가 필요함 |

### 07 사용 기간

Opti AIV-qPCR은 -20°C에서 제조일로부터 12개월(유효기간)이내에 사용해야 하며, 시약의 반복적인 냉동과 해동은 검사의 민감도에 영향을 미칠 수 있습니다.

### 06 결과판정

- (1) 반응의 결과는 Real-time PCR 기기에서 실시간으로 측정되며, threshold은 자동으로 설정된 값을 기준으로 Ct값을 확인합니다.
- (2) 음성 대조군이 음성으로, 양성대조군(PC)이 양성(Ct값 18±3)으로 판독되었을 때에 정상적인 결과 판정을 진행하며, Ct값 35 이하의 범

#### 기술지원 및 문의

유효기간 내 제품은 고객센터기준에 의하여 제품교환이나 기술지원을 요청하실 수 있습니다.

문의: (주) 옵티팜 동물진단사업팀  
 (28158) 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명 6로 63  
 Tel. 043-249-7500 FAX 043-249-7501

### <사용 시 주의사항>

#### 1. 주의사항

- ① 본 제품은 질병진단에 사용되는 동물용 체외 진단시약으로 병성감정기관 등에서만 사용합니다.(축산농가 사용제외)
- ② 검체는 위험성동물전염병으로 사용자에게 대한 안전사항 및 검사 후 실험실 내외 질병이 확산되지 않도록 주의하여 다루도록 합니다.
- ③ 본 키트로 확인된 결과는 확진용으로 사용할 수 없으며, 다른 검사방법과 임상소견에 근거한 수의사의 판단에 의해서 최종진단을 내려야 합니다.
- ④ 본 제품은 일회용 의료기기이므로 재사용을 금지합니다.

#### 2. 제품 취급 및 보관상의 주의사항

- ① 검사에 적용 가능한 검체는 돼지에서 유래된 혈액, 혈청, 조직시료 등을 사용합니다.
- ② 검체를 채취 및 수거 시에는 반드시 개인 보호장비(보호복, 마스크, 장갑, 보안경, 모자 및 신발 등)를 착용 후 수행하고 채취한 검체는 4°C를 유지하여 빠른 시간 내 (24시간 이내) 검사소로 송부합니다.
- ③ 검사 후 남은 의심검체, 오염된 실험재료 및 기구 등을 폐기하고자 하는 경우 고압증기멸균 처리등으로 불활성화하여 폐기하며, 작업테이블 등을 70% 에탄올을 이용하여 10~30분간 소독처리하여 실험실 내로 질병이 확산되지 않도록 합니다.
- ④ 검사에 사용하기 위한 RNA 추출물은 -20°C에서 보관하고, 냉동 보관된 모든 검사 시약은 실험 전에 아이스에서 녹이도록 합니다.
- ⑤ 시약의 반복적인 냉동과 해동은 검사의 민감도에 영향을 미칠 수 있습니다.
- ⑥ 검사를 자주하지 않을 경우, 시약의 일정량을 분주하여 냉동 보관하여 사용합니다.
- ⑦ 본 제품의 시약이 핵산 추출물, PCR 산물, 양

성 대조군 (Positive control, PC)에 의해 오염되지 않도록 주의합니다.

#### 3. 적용상의 주의사항

- ① 양성결과가 나올 수 있는 물질(검체, 양성대조군, 그리고 증폭산물 등)은 다른 모두 검사 시약들과 분리 보관합니다. 그리고 반응혼합물에 검체 및 양성대조군은 분리된 장소에서 혼합하며, 시약들의 오염을 방지하기 위해서 필터팁의 사용을 추천합니다.
- ② Real-time PCR에 사용하는 튜브는 Taqman probe 전용으로 사용해야 합니다. (Bio-Rad사 CFX96 기준 Taqman probe 전용 PCR tube-Cat No. TLS0851 / MLL9651)
- ③ 동일 제품에 대해 다른 Lot 혹은 동일 Lot의 시약 간 혼합을 금합니다.
- ④ 유효기간이 지난 제품은 사용하지 않습니다.
- ⑤ 본 제품 시약들의 오염을 방지하기 위해서 일회용 필터 팁의 사용을 권장합니다.
- ⑥ 타겟 핵산이 고농도로 존재하거나, 저해물질이 존재할 경우 Internal control(IC)가 증폭되지 않을 수 있습니다. 멸균수로 핵산을 희석하여 재검사를 수행합니다.
- ⑦ Roche 사 LightCycler®96 의 경우, 기기 상의 오류가 발생할 수 있기 때문에 본 제품을 이용한 진단 시 사용을 권장하지 않습니다.